



LeSONO 无线手持超声波 - 快速操作指南



版次:250430 适用应用程序 1.25.2.4 以上之版本



<u>常用功能</u>:

- 【开关机与连接】 透过扫描二维码进行探头连接
- 【注解、量测与影像储存】 注解标注、长度与面积量测与各种照片、影片储存格式
- 双屏幕功能 汇出、导入影像,进行影像比对
- **[DICOM 功能]** 下载 Worklist 及上传扫描后 DICOM 档案
- 【使用 Mac(M1/M2)运行应用程序】





【开关机与连接】

开关机与连接 - 开关机与灯号显示 (128 系列)



开关机与连接-开关机与灯号显示 (700 系列)



开关机与连接 - 与平板连接



开关机与连接 - 透过探头列表与平板连接

LELTEK



O X

开关机与连接 - 改善连线品质



开关机与连接 - 结束检验







【超声波扫描】

超声波扫描 - 扫描界面

LELTEK



"箭头方向"代表两个扫描模式间可彼此互相直接切换

超声波扫描 - B (Brightness) 模式

提供8段调整TGC

超声波扫描 - M (Motion) 模式

LELTEK

超声波扫描 - CF (Color Flow) 模式

超音波扫描 - PW (Pulse Wave) 模式 (没有 color) * Optional function LELTEK

步骤1

步骤

步骤6

超声波扫描 - PW (Pulse Wave) 模式 (有 color)

*Optional function LELTEK

超声波扫描 - PD (Power Doppler) 模式

*Optional function LELTEK

超声波扫描-标准选择&使用者自定义预设部位(700/128系列)

LELTEK

超声波扫描 - 标准选择&使用者自定义预设部位 (LX 系列)

000000015

 $\mathbf{\dot{\pi}}$

0

Μ

0

Nerisheral Vessels

Es

Lk1920

Thursday

3

选择要扫描的部位,将自动将参数

调整成合适该部位的设定

٩

Shint.

R

44

24

支用者自定义预设部位(LX 系列) LELTEK 步骤 2 选择其他探头类型标签下的部位, 它将改变探头。 步骤 3

超声波扫描 - 调整 Focus

超声波扫描 - 使用手势调整参数

超音波扫描 - 语音控制

LELTEK

控制功能	语音指令
Freeze	Freeze
Live	Live
Save image	Capture image

可下载脱机套件强化语音识别功能

【注解、量测与影像储存】

注解、量测与影像储存-注解&象形图

LELTEK

注解、量测与影像储存-M模式量测

注解、量测与影像储存-量测膀胱容积

注解、量测与影像储存-计算妊娠年龄

注解、量测与影像储存-早期产科测量

注解、量测与影像储存 - 中后期产科测量

注解、量测与影像储存-B模式测量心脏

LELTEK

158 cm Weighti 58 kg HR: 60 lipm 🥕

部片製作

@2025 Leltek Inc. - Confidential & Proprietary

31

注解、量测与影像储存-影像储存(实时)

注解、量测与影像储存-影像储存(非实时)

注解、量测与影像储存-事后编辑

LELTEK

目前仅支持编辑 B 模式且不含特殊测量工具的影像

注解、量测与影像储存-影像汇出

*请定期汇出资料,避免资料遗失。 **LELTEK**

注解、量测与影像储存-影像汇出路径

LELTEK

☞ ◎ 木在充电 ■

00000034_Qui

有所差异,请参阅装置说明书

LELTEK

@2025 Leltek Inc. - Confidential & Proprietary

2

0

批注、量测与影像储存 - 自動测量(脂肪)

LELTEK

批注、量测与影像储存 - 自動测量 (IMT)

LELTEK

批注、量测与影像储存 - 自動测量 (膀胱容积)

批注、量测与影像储存 - 自動测量 (EF)

LELTEK

【双屏幕功能】

双屏幕功能 - 开关双屏幕功能

点选「单屏幕」按钮

可以关闭双屏幕功能

15.8

a desired

D

0 1

.14

. 15 B

步骤5

17753

#1851K

按下此按钮,可以打开左侧画面

@2025 Leltek Inc. - Confidential & Proprietary

• •

双屏幕功能 - 测量 & 汇出目前影像

双屏幕功能 - 导入过去影像

双屏幕功能 - 检视汇出的影像

T. Ac. 4

13 304

8.8

15.57

9.00

1 F#

安抚探索

Alamu

) 📒 Android

Azfiecor

內型儲存空間

「汇出档案」汇出的影像,目前 无法在双屏幕功能时导入

【DICOM 功能】

DICOM 功能 - 下载 Worklist (1/2)

DICOM 功能 - 下载 Worklist (2/2)

DICOM 功能 - 录制动态 (Multi-Frame) DICOM

*Optional function LELTEK

DICOM 功能 - 上传 DICOM 档案 (1/2)

*Optional function LELTEK

DICOM 功能 - 上传 DICOM 档案 (2/2)

*Optional function LELTEK

【使用 Mac M 系列(M1芯片以上)运行应用程序】

使用 Mac M 系列(M1芯片以上)运行应用程序

LELTEK

查找在 Mac M 系列(M1芯片以上)上导出的图像

LELTEK

1. 开启【访达】

- + +	6 7.8P	= 0			-
100	68	- 02020	241	712	
No. No. of Lot o	1 1 A 1	2023/060 7152:01		一 文件法	
z m#	a anson	2023/3/6 2 19 10 2	21	- X9X	
Docarante					
1000					
12					
3.98					_
1.101					
Course in state					
88					
	0.)# 7				
114	2. 进入 <user< td=""><td>name> 又忤ヲ</td><td>έ</td><td></td><td></td></user<>	name> 又忤ヲ	έ		

进入【Con	tainers】:	文件夹		
88	- w0.08	<a0.< th=""><th>915</th><th></th></a0.<>	915	
a com apple intrust sourchoartet	2021022 246224		0000 000	
com apple internal ok	102313/1 199 5 18		文化主	
i apple iTutetCloud	1011/6/6 丁午1:00	-	文件系	
1 🚞 com apple WetchListNit	9天上930回		文件具	
🕫 🔛 Compositions	3003031111千年10.00		文作曲	
> 🚞 Contactis	2023/3/1 〒午6:06	1.1	文件关	
> 🔤 ContainerMan 🖉	但天下毕之25	-	文书家	
Contaitere	2023/1/(1)上半点2)		(大村主)	
🕖 🧮 Cookies	2023/01/27/446-29	1.00	实际另	
ConstationUp	金元上生 计相同		文件相	
🔹 🛅 Daemon Centainera	2012/06 1 = 130		实际类	
DetaAccess	令束 中华 2.24	1	文作关	
DataDeliveryServices	①天干サ225:		文行用	
) 🚞 DES	2023/0/6 下午 2:18		SFF 有	
Developer	2018/03579226		文作来	
> Chatanarias	QX T4321	-	文件書	
• CoNotDieturti	3003031(半年8:06		文明天	
 DuetExpertCenter 	20230312上午8-25		天中天	
Finance	TREADS FOR STR		交给某:	

步骤 6

步骤1

步骤	4	

步骤3

11.008

1 102513

1.0111

10.00

415

1.00

0 THE

TAT

10.0

1100

110200

- Bablerin

2 mm

123

2.92

THE .

178 125

10.016

10.0

C (Chief 22.8)

6 3 Dootsiners	= 0	第一点 ク. ロー	9
4.0		A4.1 (18)	
* 🖬 900 X (H	40A4048 7 7 3-38	- A11-00	
> 🛄 IOLAApenti	2022/00/13 平守之子4	- 3/5条	
🕴 🧰 Kerberos	2023/3/2 下午4:47	一 次件差	
· 🛄 Kaynote 訪演	2013/3/1 下午4:08	- ±11.0	
HoruGyntheoloer	2023/9/6/ 7年1161	- 299	
ImpacySometSaver	2023/3/2777-3-34	- 2158	
ImportyScreenSover-x86,54	2023/31 77 134	– 20.8	
I LELTER	2023/30/2 1-T R 40	- 1FA	
Elighthouse extends Pluger	2023/9/6 7791.01	一 文件書	
+ EINE	2033/0/8 TT 1.10	- 2510	
> the	2022/2017 71 2:38	- 2118	
The AudioService	2023/8/6 下午上日日	一 文内田	
I CREMADAService	2022/08/77/1108	- 20.8	
http://www.service	2022/0/0 77 1:53	- 208	
LinETimelinePreviewService	2023/80/11/01/11/22	- 2718	
ELNETIMERREPREVENTION 0	2023/541 719 1.88	- 219.9	
INETITIEREPRENEWSERVICE.	2022/345 717 1 58	- 108	
		- 202	
		- 268	
·开入 【LEL】	EKJ X1Ŧ÷	K - 198	
		•	

Mac M 系列(M1芯片以上)上创建导出图像文件夹的快捷方式LELTEK

1. 开启【访达】

	6 7.8P	= 0			9
1.00	68	- 49000	24	na.	
A MARKET	1 1 A 1	2023/060 7 1 2:01		一 文件法	
a mr	a anson	2023/3/8 ± 19.10 ±	21	- X5X	
Doctorente :					
4 6985					
142					
5.338.1					
2,718					
ensue that					
7.8					
	2 1# 7 4400		-		
0.114	Z. 进入 <user< td=""><td>name> 又件头</td><td>¢</td><td></td><td></td></user<>	name> 又件头	¢		

d 进入【Cor	ntainers	文件夹	3.*
24		5.60	11.0
a com apple is but swarchparted	1020302 779-523		文件史
🛯 🔚 com apple internal zk	202313/1 119:518		文和主
i apple iTuresCloud	1031/6/6 丁午1/60	-	文件天
1 🚞 com apple WetchListKit	9天上9-9010		文作用
🛚 🚞 Compositions	3033031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		文件由
> 🚞 Contactis	2023/3/1 平午5:06		文件关
🕨 🏧 ContainerMar 🖉 🖉	中东下牛之25	-	文书包
P 🔛 Contaiters	2023/1/11(下共参加)		一支扶美
> 🗮 Cookies	2013/01/775629		文作完
ControllowUs	金莲山牛井48		交換制
🛚 📷 Daemon Centaineta	2012/4/6 1 = 130	-	实际共
DetaAccess	令王 中华注24	14	支押关
DataDeliveryServices	(0天下中225)		文符例
) 🔤 DES	2023/0/6 下午 2:18		SPA
Developer	2021/08/25 779-2-26		文作来
Determina	今天下年321	-	文件类
CoNotDisturb	20030301 240.006		文件天
DuetExpertCenter	20230301 上午8-26		文作天

步骤1

步骤 5

C) Dootsiners	=0
4.0	
P MOXIM	40A4048 FT-9-38
> Di IOLAperti	2022/00/13 平守之子4
+ 📰 Herberos	2023/3/2 7 4 4:47
r 🛅 Kaynote 🕅	20123/3/1 774 6:08
> 🛅 Korediynthesiser	2023/8/6/ (F=1.61
ImpacyScreetSaver	2023/3/2777-3-34
ImpactoScreenSeven.x86.84	2023/3/17/9134
A M LELTER	2025/30/0 ETRAC

🗎 📰 Lighthouse eitecotaPhilipit

INE Audiošenice

ENE MediaService

I Int. SeakPreviewService

In EtimelinePreviewService

LINE.TimelinePreviowService.D

LINE TIME IN PROVIDE THE INVESTIGATION IN

ELINE

> TI LINE

步骤3

415.

1.00

步骤 4

10.0

1100

10250

10121011

2 mm

100

2.32

C 118

- 28

10.006

12

目- 白 2 6-

HE 1000

- 3**5**5

一次作品

主作用

二元作用

文件书

2016

二百日本

世代日

211.0

文件完

工作利

实件系

3.09.00

立内市

実務者

一 文件先

支持市

2023/9/6 7791101

2033/0/8 712110

2022/2/17 7 = 2:38

2023/8/6 平平上日

2023/00/771148

2023/0/6 学生上58

1013/8// 上平1133

2023/0/0 7 19 100

2023/5/6 777 1:50

进入【LELTEK】文件夹